

# PRO-SOLID

Dental & Personal Care



## ÜRÜN AÇIKLAMASI

Pro-Solid doğal olarak oluşan alçı taşından üretilmiş, formüle edilmiş bir hemihidrat alçıdır ( $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ ). Alçı sarı, pembe, yeşil ve mavi renklerde mevcuttur. Bu ürün karşıt modeller, çalışma modelleri, tamir modelleri, protetik modelleri için kullanılır.

## ÜRÜN AVANTAJLARI

- + Тип 3 згідно ISO 6873
- + Низьке розширення

## ZASTOSOWANIE

Dental

## TEKNIK BILGILER

Kimyasal Adı	Kalsiyum sülfat hemihidrat
Kimyasal Kompozisyon	$\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$
Alçı-su oranı (ağırlık olarak)	3.33:1
Su-alçı oranı (ağırlık olarak)	0.3
Alçı-su karışma oranı (ağırlık olarak)	100/30
Renk	Sarı, Pembe, Yeşil veya Mavi (alternatifler için lütfen satış temsilcinizle görüşün)
Donma sonu (dakika)	15
Çalışma süresi (dakika)	10
Lineer Genleşme (%)	0.18
Yaş Basma Dayanımı (MPa)	28

Özetlenen teknik veriler sadece tipik rakamları temsil eder. Daha fazla bilgi için, doğrudan Saint-Gobain Formula ile temasa geçiniz.

## KULLANIM İÇİN TALIMATLAR

Karıştırma kapları her zaman temiz ve donmuş alçıdan arındırılmış olmalıdır. Sadece temiz su kullanın. Doğru kıvamda sonuçlar için, alçı ve suyun doğru oranlamasına ve karıştırılmasına özen gösterilmelidir. Tartılan miktarda alçıyı yavaşça ölçülen miktarda suyun içine ekleyin ve 30 ila 60 saniye kadar emilmesini bekleyin. Eşit bir karışım elde etmek için 30 ila 60 saniye boyunca bir spatula ile güçlü bir şekilde karıştırın. Vakumlu veya vakumsuz mekanik karıştırma kullanılırsa, karıştırma süresi elle karıştırma süresinden çok daha az olacaktır. Süre karıştırıcı tipine ve hızına bağlıdır. Çok ince ayrıntı elde etmek ve hava kabarcıklarını önlemek için alçı, kalıbın içinde titrestirilmelidir. Karışımın akışkanlığı su oranını artırmak suretiyle çoğaltılabilir ancak bu dayanımın ve sertliğin azalması ile sonuçlanacaktır. Yeni karıştırılmış alçıyı daha önceden karıştırılmış olan alçıyla karıştırmayın.

## AMBALAJLAMA / RAF ÖMRÜ

	Ambalajlama	Raf ömrü(ay)
Torbalar	25 kg	9
Torbalar	25 kg	18* Ağız açık çuval
Tub	25 kg	24

Kuru koşullarda ve orijinal ambalajında saklandığında, ürün üretim tarihinden itibaren başlayan ve her torba üzerinde bulunan belirli bir raf ömrüne sahip olacaktır. Raf ömrü ambalaj tipine bağlıdır. Belirli bir 'son kullanma tarihi' olan ürünlerde, her torbanın üzerinde SKT (Son Kullanma Tarihi) yazısı ve tarih bulunur.

## SERTİFİKASYON



## SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE

Saint-Gobain Formula alçılar ve alçı taşı mineralleri için. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu tüm ürünler için mevcuttur ve websitesindeki ürün ve belgeler bölümlerinde bulunabilir. Ürünün yanlış kullanımı nedeniyle kişilerin yaralanması veya mal kaybı ya da hasarı durumunda Saint-Gobain Formula hiçbir sorumluluk kabul etmez.

## BİLDİRİM

Belirtilen alçı-su oranları, Saint-Gobain Formula'nın standart test yöntemlerinde kullanılmakta olanlardır ve her zaman pratikte kullanılanlar olmayabilir. Kullanılacak tam kıvamın, her uygulama için uygun şekilde özel olarak ayarlanması gerekir. Alçı-su oranındaki değişiklikler ürün performansını, özellikle de donma süresi ve dayanımını etkileyecektir. Aksi belirtilmedikçe, Saint-Gobain Formula'nın standart test yöntemleri uygulanır. Test yönteminin bir kopyasını edinmek için, lütfen Saint-Gobain Formula ile doğrudan irtibata geçiniz.

Bu kitapçık daha önceki belgeleri iptal eder ve onların yerine geçer. Verilen tüm bilgiler iyi niyetle bir araya getirilmiştir ve değişikliğe tabidir. Bu kitapçığın içeriği veya geçerliliği ile ilgili herhangi bir şüphe halinde, Saint-Gobain Formula ile irtibata geçilmesi tavsiye edilir.

## İLETİSİM

Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz:

[www.saintgobainformula.com](http://www.saintgobainformula.com)



Satış  
Yetkilisi



Belgeler



Teknik  
bilgiler



Genel  
bilgiler